

# MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTÁGIO POR CORONAVÍRUS

## Como retirar as luvas correctamente



É importante lavar as mãos antes de colocar as luvas

Pegue numa das luvas pelo

**LADO DA PALMA DA MÃO**


e

à **ALTURA DO DESENHO.**



1


Puxe a luva de modo a que, quando removida, **FIQUE DO AVESSE.**

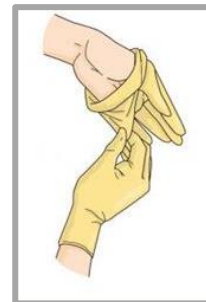

2

**Segure a luva, já removida, com a palma** da mão que ainda tem a luva.

**Insira os dedos à altura do desenho** para retirar a outra luva, de modo a que a sua pele toque apenas no interior da luva.

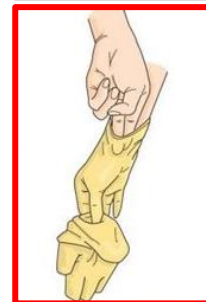

3

4

**PUXE A LUVA** até que fique do avesso, sem deixar de segurar na primeira. Assim, **a luva que retirou em primeiro lugar ficará dentro da segunda luva.**

5

**DEITE** as luvas no contentor apropriado.



6

É essencial **LAVAR AS MÃOS** com água e sabão imediatamente depois de ter retirado as luvas e antes de tocar noutra superfície.



**REPSOL**